

CRYSTAL 512OPTIMA

LA LUMIÈRE PULSÉE: UNE RÉVOLUTION

Technique phare de ces dernières années, la lumière pulsée a révolutionné le monde de l'esthétique et largement démontré son efficacité et son innocuité notamment pour les soins de DÉPILATION RADICALE et de RÉJUVÉNATION.

CRYSTAL 512 OPTIMA est un système dernière génération bénéficiant des dernières innovations technologiques ce qui lui permet des performances optimisées pour des résultats exceptionnels.

Sa technologie GEM-PL brevetée est confirmée par + de 10 ans de reconnaissance et validée par les plus exigeantes normes de sécurité internationales.



CRYSTAL 512OPTIMA

QUESTIONS/RÉPONSES



COMBIEN DE TEMPS DURE UNE SÉANCE DE DÉPILATION?

La durée d'une séance varie selon la zone à traiter, il faut compter en moyenne :

Aisselles ou maillot : 2 à 5 minutes
Demi-jambes : 15 à 20 minutes
Barbe : 5 à 10 minutes
Dos complet : 20 à 30 minutes

COMBIEN DE TEMPS DURE UNE SÉANCE DE RÉJUVÉNATION?

La séance de réjuvenation visage sera d'environ 15 à 20 minutes.

QUELLES SONT LES CONTRE INDICATIONS?

Les principales contre indications sont: le bronzage, le traitement des femmes enceintes et les porteurs d'un pace-maker.

CRYSTAL 512 OPTIMA est validée par les normes de fonctionnement et de sécurité les plus exigeantes (CE Médical, certifications européennes et internationales : CE-MDD, IEC 601-1, CFS, CSA, ISO13485, ISO9001, FDA.).

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL COMPTER ENTRE CHAQUE SÉANCE DE DÉPILATION?

Les 3 premières séances sont espacées de 5 à 7 semaines puis les séances suivantes seront de moins en moins rapprochées.

COMBIEN DE SÉANCES SONT NÉCESSAIRES AVANT LE RÉSULTAT DÉFINITIF?

En moyenne 8 à 10 séances seront nécessaires, elles seront étalées sur la durée du cycle total pileire (18 mois). Cela dépendra également de nombreux paramètres qui seront évalués et définis avec vous lors de votre premier rendez-vous.

 **active 512**
www.active512.com

DÉPILATION RADICALE - RÉJUVÉNATION

EXIGEZ
LA PERFECTION



LUMIÈRE PULSÉE
NOUVELLE GÉNÉRATION

CRYSTAL 512
.....OPTIMA

CRYSTAL 512
...OPTIMA

TYPES D'ACTION

DÉPILATION PERMANENTE

Les méthodes épilatoires ponctuelles telles que rasage, arrachage à la cire, mécanique, dépilation chimique... sont sources de nombreux désagréments : fréquence accélérée, inflammations, repousse sous cutanée, boutons, épaissement et renforcement du poil. De plus elles nécessitent une répétition laborieuse, régulière et constante.

Par ailleurs certains craignent que les méthodes dépilatoires permanentes soient trop agressives et peu efficaces, sans être toujours sans risque. La technologie brevetée GEM-PL de **CRYSTAL 512 OPTIMA**, basée sur les performances démontrées de la lumière pulsée, répond à toutes les exigences d'EFFICACITÉ et de DOUCEUR. Elle permet une éradication totale et permanente du follicule pileux en toute SECURITÉ, même sur les zones sensibles du visage et du corps. LA PERFECTION D'UNE DÉPILATION IMPECCABLE ET PERMANENTE.

PHOTO REJUVÉNATION

Au fil du temps et de divers facteurs (soleil, pollution, tabac, alcool etc...) la qualité de la peau se dégrade, elle se marque, s'épaissit, se relâche. Par son action en profondeur la technique de **CRYSTAL 512 OPTIMA** est idéale pour lutter contre les signes visibles du vieillissement. La lumière intense pulsée dynamise les fonctions cutanées, lutte contre le relâchement et atténue les imperfections. La peau est affinée, le teint reposé, les marques atténuées. LES RÉSULTATS SPECTACULAIRES ET DURABLES D'UNE CURE DE RÉJUVÉNATION.

CRYSTAL 512
...OPTIMA

MODES D'ACTION

La lumière intense pulsée du CRYSTAL 512 OPTIMA, grâce au système breveté GEM-PL est une technologie non invasive couvrant un large spectre lumineux -de 420 à 1 100 nanomètres- permettant une action sur plusieurs niveaux.

Ayant fait ses preuves depuis une dizaine d'années elle permet une action pour plusieurs types d'applications esthétiques incluant la dépilation radicale, la photo réjuvenation.


Issue de la dernière génération et bénéficiant des dernières innovations, **CRYSTAL 512 OPTIMA** offre un confort et une efficacité exceptionnels. Son exigence de sécurité a été validée par les normes de sécurité les plus rigoureuses (CE Médical, certifications européennes et internationales : CE-MDD, IEC 601-1, CFS, CSA, ISO13485, ISO9001, FDA.).

MODE D'ACTION



La lumière intense pulsée agit par photothermolyse sélective ciblant les zones riches en mélanine sur lesquelles se concentre son action. L'énergie des flashs se focalise sur les zones sélectionnées et se transforme en chaleur.

DÉPILATION PERMANENTE

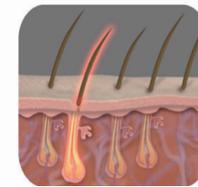


Les flashs de lumière intense pulsée, se concentrent sur les zones pigmentaires sombres (poils).


La chaleur générée se diffuse le long du follicule pileux jusqu'à la racine.

Le poil est détruit ainsi que son bulbe.

> Le mécanisme de repousse du poil est définitivement supprimé, son cycle est interrompu.

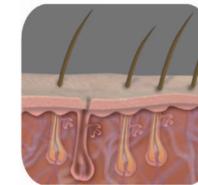

RÉJUVÉNATION

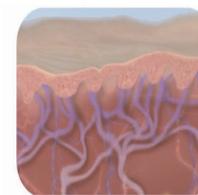


Les flashs de lumière intense pulsée dynamisent le renouvellement cellulaire.

Ce processus naturel retend les fibres de collagène qui retrouvent leur rôle de soutien. Les fibroblastes sont stimulés.

Les échanges intra-cellulaires reprennent, l'activité cellulaire est réactivée.

> Le teint est lissé, les rides atténuées, les traits reposés. L'aspect visiblement plus jeune.

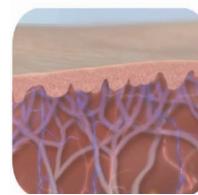


CRYSTAL 512
...OPTIMA

RÉSULTATS


La technique non invasive GEM-PL de la CRYSTAL 512 OPTIMA permet une action rapide, visible et durable, dès les premières séances.

DÉPILATION

Réduction moyenne de la pilosité en %
(Mesurée 30 jours après chaque traitement)

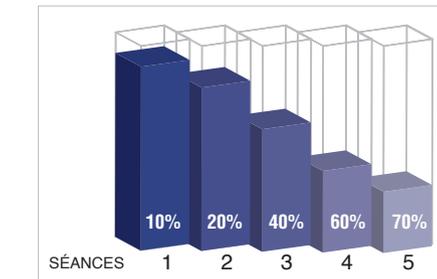

RÉJUVÉNATION action sur le collagène

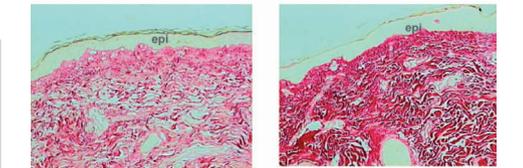


Avant traitement

Après traitement

L'épiderme est repulpé
Le collagène densifié

Patriota RC, Rodrigues CJ, Cucé LC

RÉJUVÉNATION action sur l'élastine

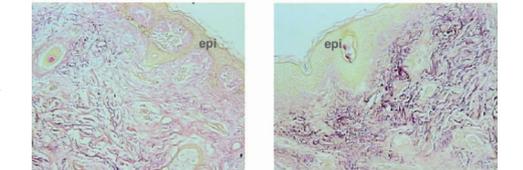

Avant traitement

Après traitement

L'élastine est restructurée

Patriota RC, Rodrigues CJ, Cucé LC

